



Medical Devices, Inc.
 4401 Varsity Dr Suite D
 Ann Arbor, MI 48108
 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com

HalochestSeals.Com



Medical Device



Do Not

-34°C
-30°F



Designated
Temperature

60°C
140°F



Not Sterilized




Do Not Use if
Package is
Damaged or



Not
Manufactured
with Natural



Instructions
Available

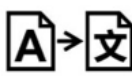

Translation
Available



[Http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU](http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU)

Description du Produit:

Halo Seal et Halo XL se composent d'une couche adhésive d'hydrogel et d'une couche de support adhésive sans latex. Il est imperméable aux liquides et scelle la plaie jusqu'à ce que le patient puisse être transporté vers un établissement de santé.

Indications D'Utilisation :

Les produits Halo sont conçus pour faciliter le traitement des plaies thoraciques en utilisant des techniques d'application de pansement standard qui aident les civils ou les intervenants d'urgence. Conçu pour couvrir et protéger les plaies. Ne pas utiliser le pansement en remplacement des sutures et autres méthodes de fermeture primaire de la plaie. Les produits Halo sont un produit à usage unique. Les tentatives de réutilisation d'un produit Halo peuvent introduire une contamination et une infection chez un patient secondaire. Aucune indication d'utilisation, de sécurité, de risque ou d'efficacité n'est établie pour les applications post-chirurgicales.

Avertissements:

Assurez-vous que le Halo scelle complètement le périmètre de la plaie pour empêcher l'entrée d'air, de liquides et de débris. Les personnes qui ont des blessures thoraciques doivent être immédiatement transportées vers un établissement de soins de santé ou de traumatologie pour évaluation par un clinicien pour les soins et le traitement ultérieurs. Ne placez pas le joint sur de gros morceaux de débris afin que l'hydrogel puisse former un joint complet.

Application:

Plaie propre et sèche.

Retirer de la doublure antiadhésive. Ne pas placer sur la surface secondaire avant l'application pour éviter toute contamination.

Avec le côté gel vers le bas, placez-le au centre de la plaie.

Exercer une légère pression - Ne pas étirer pendant l'application.

Utilisez des Halo Seals supplémentaires, si d'autres blessures sont présentes.



Vidéo d'application

Transporter le patient à l'établissement de soins d'urgence pour le post-traitement et l'évaluation

Jeter après utilisation, conformément aux directives locales sur les déchets de dispositifs médicaux.

Coordonnées:



Manufacturer : Medical Devices , Inc.



Veuillez contacter ou signaler tout incident grave concernant ce produit au fabricant et aux autorités réglementaires.

NB#
2862

EC REP
Obelis s.a.
Bd. Général Wafis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



CLEAN AND
DRY WOUND



REMOVE PRODUCT
FROM PACKAGING,
REMOVE RELEASE LINER



APPLY PRODUCT
WITH LIGHT PRESSURE



Transport Patient to
Emergency Care Facility for
Evaluation and Post
Treatment

