



HalochestSeals.Com

MDI

Medical Devices, Inc.
4401 Varsity Dr Suite D
Ann Arbor, MI 48108
(800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



Medical Device



Do Not

-34°C
-30°F



Designated Temperature

60°C
140°F



Not Sterilized




Do Not Use if Package is Damaged or



Not Manufactured with Natural



Instructions Available

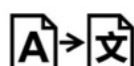

Translation Available



Http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU

Description du Produit:

Les Halo Vents sont des dispositifs médicaux constitués d'une couche d'hydrogel adhésive et d'une couche de support adhésive (sans latex). Les produits Halo ne contiennent aucune substance médicamenteuse et ne sont pas fabriqués à partir de dérivés animaux ou humains. Il est imperméable aux liquides et scelle la plaie. Les produits Halo sont destinés à être utilisés jusqu'à ce que le patient puisse être transporté vers un établissement de soins de santé où ils seront retirés pour l'évaluation du patient et les soins post-opératoires.

Indications D'Utilisation :

Les produits Halo sont conçus pour faciliter le traitement des plaies thoraciques en utilisant des techniques d'application de pansement standard qui aident les civils ou les intervenants d'urgence. Conçu pour couvrir et protéger les plaies. Ne pas utiliser le pansement en remplacement des sutures et autres méthodes de fermeture primaire de la plaie. Les produits Halo sont un produit à usage unique. Les tentatives de réutilisation d'un produit Halo peuvent introduire une contamination et une infection chez un patient secondaire. Aucune indication d'utilisation, de sécurité, de risque ou d'efficacité n'est établie pour les applications post-chirurgicales.

Avertissements:

Assurez-vous que le Halo scelle complètement le périmètre de la plaie pour empêcher l'entrée d'air, de liquides et de débris. Les personnes qui ont des blessures thoraciques doivent être immédiatement transportées vers un établissement de soins de santé ou de traumatologie pour évaluation par un clinicien pour les soins et le traitement ultérieurs. Ne bloquez pas l'évent ou la valve par des éléments tels que des couvertures, des sangles ou la position du corps.

Application:

- Plaie propre et sèche.
Retirer de la doublure antiadhésive. Ne pas placer sur la surface secondaire avant l'application pour éviter toute contamination.
Avec le côté gel vers le bas, placez-le au centre de la plaie.
Exercer une légère pression - Ne pas étirer pendant l'application.
Utilisez des Halo Seals supplémentaires, si d'autres blessures sont présentes.



Vidéo d'application

Transporter le patient à l'établissement de soins d'urgence pour le post-traitement et l'évaluation

Jeter après utilisation, conformément aux directives locales sur les déchets de dispositifs médicaux.

Coordonnées:



Manufacturer : Medical Devices , Inc.



Veuillez contacter ou signaler tout incident grave concernant ce produit au fabricant et aux autorités réglementaires.

NB# 2862

EC REP
Obelis s.a.
Bd. Général Wahnis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



CLEAN AND DRY WOUND



REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING, REMOVE RELEASE LINER



APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE



Transport Patient to Emergency Care Facility for Evaluation and Post Treatment

