

# HALO VENT™

HalochestSeals.Com

## MDI

Medical Devices, Inc.

4401 Varsity Dr Suite D

Ann Arbor, MI 48108

(800) 828-4681

info@medicaldevicesinc.com



Medical Device



Do Not

-34°C

-30°F



Designated Temperature

60°C

140°F



Not Sterilized




Do Not Use if Package is Damaged or



Not Manufactured with Natural



Instructions Available

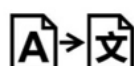

Translation Available



[Http://www.halochestseals.com/ifu](http://www.halochestseals.com/ifu)

#### Popis Produktu:

Halo Vents sú zdravotnícke pomôcky, ktoré pozostávajú z príľnavej hydrogélovej vrstvy a príľnavej (nelatexovej) podkladovej vrstvy. Produkty Halo neobsahujú žiadne liečivé látky a nie sú vyrobené zo živočíšnych alebo ľudských derivátov. Je nepriepustný pre tekutiny a utesňuje ranu. Produkty Halo sú určené na použitie, kým nebude možné pacienta prepraviť do zdravotníckeho zariadenia, kde budú odstránené na posúdenie pacienta a následnú starostlivosť.

#### Indikácie na Použitie:

Produkty Halo sú navrhnuté tak, aby pomáhali pri liečbe hrudných rán pomocou štandardných techník nanášania obväzov, ktoré pomáhajú civilným osobám alebo záchranárom. Určené na krytie a ochranu rán. Obväz nepoužívajte ako náhradu za stehy a iné primárne metódy uzatvárania rany. Halo produkty sú produkty na jedno použitie. Pokusy o opätovné použitie produktov Halo môžu spôsobiť kontamináciu a infekciu sekundárnemu pacientovi. Pre pooperačné aplikácie nie sú stanovené žiadne indikácie použitia, bezpečnosti, rizika alebo účinnosti.

#### Varovania:

Uistite sa, že Halo úplne utesňuje obvod rany, aby sa zabránilo vniknutiu vzduchu, tekutín a nečistôt. Osoby, ktoré majú poranenie hrudníka, by mali byť okamžite prevezené do zdravotníckeho alebo traumatologického zariadenia na posúdenie klinikom pre následnú starostlivosť a liečbu. Neblokujte vetrací otvor alebo ventil predmetmi, ako sú prikrývky, popruhy alebo poloha tela.

#### Aplikácia:

Čistá a suchá rana.

Odstráňte z uvoľňovacej fólie. Pred aplikáciou nekladte na sekundárny povrch, aby ste zabránili kontaminácii.

Gélom nadol položte na stred rany.

Použite mierny tlak - Počas aplikácie sa nenafahujte.

Ak sú prítomné ďalšie rany, použite ďalšie Halo Seals.



Video aplikácie

Prevoz pacienta do zariadenia pohotovostnej starostlivosti na následné ošetrenie a vyhodnotenie

Po použití zlikvidujte podľa miestnych smerníc o odpade zo zdravotníckych pomôcok.

#### Kontaktné informácie:



Manufacturer : Medical Devices , Inc.

Akkoľvek vážne incidenty týkajúce sa tohto produktu kontaktujte alebo nahláste výrobcovi a regulačným orgánom.

NB#  
2862



EC REP  
Obelis s.a.  
Bd. Général Wabis 53  
1030 Brussels, Belgium  
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54  
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



CLEAN AND DRY WOUND



REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING, REMOVE RELEASE LINER



APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE



Transport Patient to Emergency Care Facility for Evaluation and Post Treatment



MAW - 0563 Slovak Rev. 01